

InstillaGel® Hydro

Hydrogel zur Wundbehandlung in der Harnröhre.

Gebrauchsinformation. Bitte aufmerksam lesen!

Stand der Information: Februar 2018

InstillaGel® Hydro enthält: Hydroxyethylcellulose, Dexpanthenol, Ectoin, Allium cepa, Natriumchlorid, Zitronensäure, Polihexanid.

Anwendungsgebiet: Hydrogel zur Filmbildung bei der feuchten Wundbehandlung in der Harnröhre, auch zur Reduktion der Narbenbildung (nach transurethralen Interventionen wie z. B. Bougierung, instrumentellem Eingriff oder Schlitzung).

Anwendung: Das Produkt ist zum Auftragen auf die Schleimhaut der Harnröhre bestimmt.

Die anfängliche Behandlung wird postoperativ durch den behandelnden Arzt vorgenommen.

Weitere Applikationen können bis zu 7 Tage nach dem Eingriff durch den Patienten selbst erfolgen. **InstillaGel® Hydro** kann täglich 2- bis 3-mal jeweils nach Blasenentleerung angewendet werden. Dies sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen.

Für die Anwendung beim Mann wird der gesamte Inhalt einer InstillaGel® Hydro-Spritze instilliert. Für die Anwendung bei der Frau oder beim Kind wird die vom behandelnden Arzt empfohlene Menge instilliert.

Nebenwirkungen: Es können allergische Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe auftreten. Bei Unsicherheiten sollte ein Arzt befragt werden.

Gegenanzeigen: **InstillaGel® Hydro** darf nicht genommen werden bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen: Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Hinweise: *Schwangerschaft und Stillzeit:* Es liegen keine Erfahrungen für die Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen vor. Die Anwendung sollte daher nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Kinder und Jugendliche unter 12 Jahre: Bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren bestehen keine Erfahrungen. Die Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Aufbewahrungshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!


Inhalt und Darreichungsform: 11ml Gel in vorgefüllter Spritze in sterilem Blister fertig zum Gebrauch.

InstillaGel® Hydro Anwendung:

- 1 — Gründliches Händewaschen und anschließende Desinfektion der Hände.
- 2 — Reinigung der äußeren Harnröhrenmündung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.
- 3 — Abziehen des Papiers des Blisters und Herausnahme der Spritze.
- 4 — Vor Entfernen der Verschlusskappe Spritze gegen einen festen Widerstand drücken (z.B. Tischplatte) dabei farbige Kolbenstange leicht andrücken um den Druck in der Spritze zu lösen.
- 5 — Verschlusskappe entfernen ohne die Spritzenspitze zu berühren.
- 6 — Applikation eines Tropfens des Gels auf die Harnröhrenmündung, um die Einführung des Spritzenkonus in die Harnröhre zu erleichtern.
- 7 — Langsames Instillieren des gesamten Gels oder der vom Arzt empfohlenen Gelmenge durch gleichmäßiges Herunterdrücken der Kolbenstange.
- 8 — Abnahme der Spritze und Entsorgung über den Hausmüll (ggf. inklusive evtl. vorhandener Gelreste).



4 —

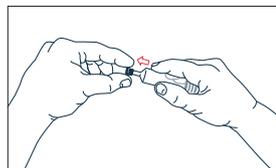

5 —



7 —



7 —

STERIL VERPACKT



Do not use if package is damaged



HCS HealthCare Supply GmbH
Schwester-Zita-Weg 11
52080 Aachen
Germany

VERTRIEB

FARCO-PHARMA GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Germany

FARCO-PHARMA GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11 — D-50670 Köln

Büro — Im Mediapark 8a — D-50670 Köln

Telefon — +49 (0)221 594061 Fax — +49 (0)221 593614

E-Mail — info@farco-pharma.de Web — www.farco.de



FARCO