



FARCO



Die Instillationstherapie für  
mehr Lebensqualität



**Instillamed<sup>®</sup>**

2-Komponenten-Schutz  
für die Blasenwand

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie als Betroffene/-er sowie Ihr Facharzt wissen es am besten:  
Chronische Cystitiden – allen Formen voran die Interstitielle Cystitis (IC) – sind seltene aber dennoch schwerwiegende und teilweise höchst belastende Erkrankungen.

Für viele Patienten bedeutet IC ein Leben mit Beschwerden, wie häufigem und nächtlichem Wasserlassen, ständigem, teilweise nicht zu unterdrückendem Harndrang und brennendem Schmerz, z. B. in der Blase und im Unterbauch, in der Harnröhre und an den Genitalien.

Je nach Ausprägung der Beschwerden kann die gesamte Lebensführung beeinträchtigt sein. Deshalb ist, neben der rein symptomatischen Behandlung durch Schmerzmittel und den Harndrang unterdrückenden Medikamenten, eine ursachennahe Therapie zum Schutz und Wiederaufbau der Harnblasenwand unverzichtbar.

Am vielversprechendsten unter den verschiedenen Behandlungsverfahren sind aktuell Präparate zur Instillation in die Blase wie Instillamed®. Dies bestätigt eine Versorgungsstudie mit 270 IC-Patienten in Deutschland.

Das Medizinprodukt Instillamed® bietet Ihnen eine optimierte Lösung und setzt aktive Impulse im Bereich der Instillationstherapie.

Möchten Sie mehr darüber wissen? Auf den folgenden Seiten haben wir die wichtigsten Informationen zu Instillamed® für Sie zusammengefasst. Sie finden dort außerdem Kontaktadressen für alle weiterführenden Informationen zum Krankheitsbild.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

FARCO-PHARMA

## Was ist das Besondere an Instillamed®?

Instillamed® ermöglicht die **intensive Regeneration der GAG-Schicht** (Blasenschutz-Schicht).

Mit einer **Chondroitinsulfat-Hyaluronsäure-Lösung**<sup>1</sup>, die der Wirkstoffkonzentration Instillamed® entspricht, konnte eine deutliche Reduktion der Schmerz- und Drangsymptomatik erzielt werden.

Die bewährte Wirkweise der Instillationstherapien liegt im **Ersatz** der durch einen entzündlichen Prozess zerstörten Bestandteile der **GAG-Schicht**.

Als besondere Instillationstherapie zum Aufbau der GAG-Schicht bietet Instillamed® den **2-Komponenten-Schutz** für die Blasenwand durch die beiden **Wirkstoffe**

- Hyaluronsäure
- Chondroitinsulfat

Der 2-Komponenten-Schutz Instillamed® steht in einer **anwendungsfertigen Einmalspritze** zur Verfügung.


|                                  | Instillamed |
|----------------------------------|-------------|
| 2-Komponenten-Schutz             | ✓           |
| Fertigspritze mit Safety-Adapter | ✓           |
| Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | ✓           |



<sup>1</sup> **Referenzprodukt:** Instillation 40 ml mit Hyaluronsäure (1,6 %) und Chondroitinsulfat (2,0 %); Einwirkzeit 1-2 Stunden; Wöchentliche Instillation über acht Wochen, danach sechs Monate alle zwei Wochen eine Instillation *Porru et al. 2012*  
**Instillamed®:** Instillation 50 ml mit Hyaluronsäure (1,6 %) und Chondroitinsulfat (2,0 %); Einwirkzeit mindestens 30 Minuten; Empfehlung: Je nach Symptomverlauf wöchentliche Instillation über vier Wochen, danach bis zu sechs Monaten eine Instillation pro Monat


# Was kann ich von Instillamed® erwarten?

## Weniger Schmerzen und reduzierter Harndrang<sup>1</sup>

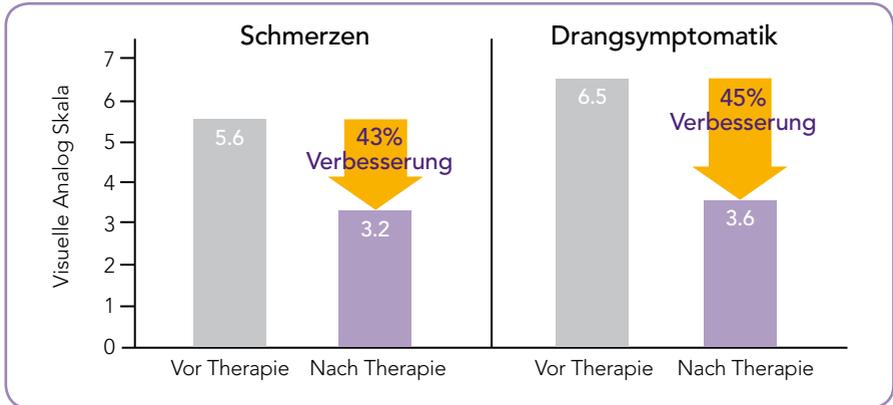

In einer Studie konnte gezeigt werden, dass eine Behandlung mit einer Chondroitinsulfat-Hyaluronsäure-Lösung gleicher Konzentration Schmerzen und Drangsymptomatik deutlich reduzieren kann.<sup>1</sup>

## Seltener Harnwegsinfekte<sup>2</sup>

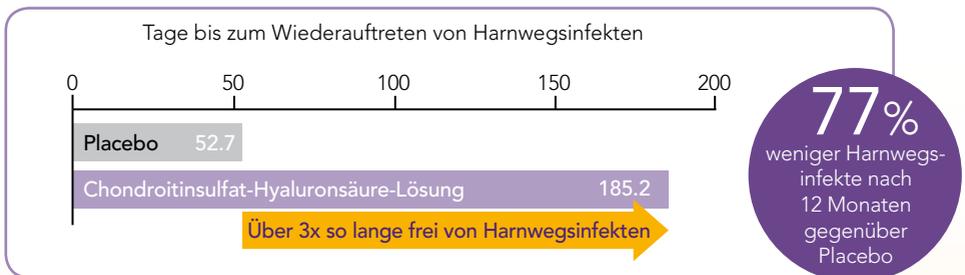

Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Patientinnen, die an häufig wiederkehrenden Harnwegsinfekten leiden, die Zeitspanne bis zum Auftreten der nächsten Harnwegsinfektion durch die Behandlung mit einer Chondroitinsulfat-Hyaluronsäure-Lösung mit gleicher Konzentration um durchschnittlich 133 Tage deutlich verlängert werden konnte.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> **Referenzprodukt:** Instillation 50 ml mit Hyaluronsäure (1,6 %) und Chondroitinsulfat (2,0 %); Wöchentliche Instillation über vier Wochen, danach eine Instillation pro Monat für fünf Monate Damiano et al. 2011  
**Instillamed®:** Instillation 50 ml mit Hyaluronsäure (1,6 %) und Chondroitinsulfat (2,0 %); Empfehlung: Je nach Symptomverlauf wöchentliche Instillation über vier Wochen, danach bis zu sechs Monaten eine Instillation pro Monat

# Wie wirkt Instillamed®?

## Instillamed® bietet 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand

Die Gemeinsamkeit aller Formen der Chronischen Cystitis besteht darin, dass eine Schädigung der Glykosaminoglykan-Schicht, die die Innenwand der Harnblase auskleidet und schützt, für die Symptome und deren Fortschreiten verantwortlich sein kann.

Die in Instillamed® enthaltenen Wirkstoffe Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat gehören zu den natürlichen Bausteinen der GAG-Schicht. Kombiniert zugeführt können sie die Symptome lindern und das Fortschreiten der Erkrankung eindämmen indem sie...

- ...den bestehenden Mangel an Glykosaminoglykanen ausgleichen.
- ...eine intensive Regeneration der GAG-Schicht herbeiführen.
- ...die Schutzfunktion der Blasenwand wiederherstellen.

## Instillamed® setzt an ursächlichen Faktoren an

Hyaluronsäure kann zudem das Ablagern von Bakterien, Immunkomplexen und anderen schädigenden Teilchen an der Blasenwand hemmen und senkt so das Risiko erneuter Infektionen und wiederholter Entzündungen. Außerdem erhöht Hyaluronsäure die Elastizität des Gewebes und setzt somit an wesentlichen, ursächlichen Faktoren der Chronischen Cystitis an.



- Hyaluronsäure
- Chondroitinsulfat

Die durch Instillamed® regenerierte GAG-Schicht verhindert das Eindringen toxischer und reizauslösender Substanzen (z. B. Kaliumionen) aus dem Urin.

# Wie sieht die Therapie mit Instillamed® aus?

## Schritt 1: Das Gespräch mit Ihrem Arzt

Sprechen Sie Ihren behandelnden Urologen auf eine Therapie mit Instillamed® an. Nach der Beratung können Sie Instillamed® in Ihrer Apotheke kaufen. Wie alle Instillationstherapien wird auch Instillamed® leider nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.


In der Regel werden die Instillationen durch Ihren Urologen vorgenommen. Patienten, die in der Selbstkatheterisierung erfahren sind, halten bitte Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt.

## Schritt 2: Die Anwendung

Die Instillation von Instillamed® erfolgt durch einen Katheter direkt in Ihre Harnblase. Dabei sollte idealerweise ein Katheter der Stärke 12 Charrière verwendet werden. Instillamed® soll mindestens 30 Minuten einwirken. Diese Zeit sollten Sie idealerweise liegend verbringen und daher mit in die Dauer Ihres Arztbesuchs einplanen.

## Schritt 3: Der Therapieverlauf

Bei Therapiebeginn werden, je nach Symptomverlauf, eine Instillation pro Woche für 4 Behandlungswochen empfohlen. Anschließend sollte die Behandlung bis zu 6 Monaten im monatlichen Abstand erfolgen.

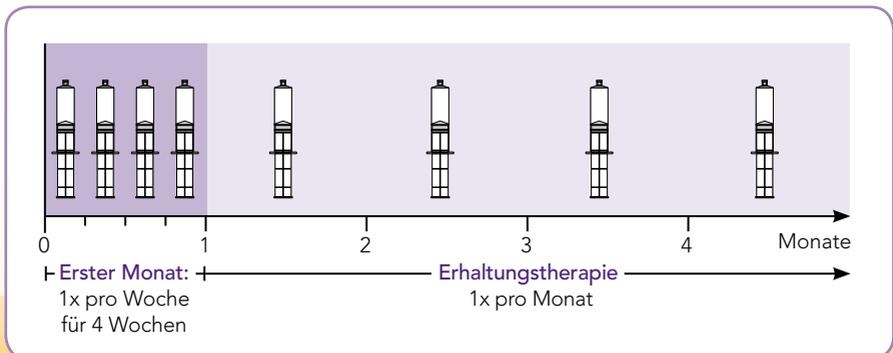

# Wie erfahre ich mehr über die Therapie?

## Nähere Informationen zum Krankheitsbild und Instillamed®:

[www.instillamed.de](http://www.instillamed.de)

Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Instillamed® haben.

[info@instillamed.de](mailto:info@instillamed.de)

Telefon: 0221 - 594061

## Weitere Informationen zu Interstitieller Cystitis:

Umfangreiche Informationen zur Interstitiellen Cystitis bietet Ihnen der ICA-Deutschland e. V., Förderverein für Interstitielle Cystitis, unter:

[www.ica-ev.de](http://www.ica-ev.de)

Eine persönliche Kontaktaufnahme ist möglich unter:

[info@ica-ev.de](mailto:info@ica-ev.de)

ICA-Notfall-Mobil-Telefon: 0163 - 908 44 93



Einmalspritze mit 50 ml Chondroitinsulfat- und Hyaluronsäure-Lösung

PZN: 13242130

**Zusammensetzung:** 50 ml Instillamed® enthalten 800 mg Natrium Hyaluronate, 1000mg Chondroitinsulfat. **Gegenanzeigen:** Instillamed® sollte nicht bei Kindern unter 12 Jahren und Schwangeren angewendet werden, da keine Anwendungserfahrungen vorliegen. **Hersteller:** BioScience GmbH, Walsmühler Str. 18, 19073 Dümmer, Germany. **Vertrieb:** FARCO-PHARMA GmbH, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Germany.



Arztstempel

[www.instillamed.de](http://www.instillamed.de)

